

Rollator OS1



1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis
2. Einleitung
3. Beschreibung der Teile
4. Handhabung
5. Technische Daten
6. Sicherheitshinweise

2. Einleitung

Produktmerkmale:

1. Kann zu einer kompakten Größe zusammengeklappt werden und lässt sich somit hervorragend transportieren.
2. Die Sitzhöhe kann auf drei verschiedene Positionen eingestellt werden.
3. Die Schiebegriffe können auf sechs verschiedene Höhen eingestellt werden.
4. Die Rückenlehne kann abgenommen werden.
5. Der Rollator bleibt auch nach dem Zusammenklappen auf eine sehr kompakte Größe noch stehen.
6. Wird mit einer vorn anzubringenden Einkaufstasche geliefert.



3. Beschreibung der Teile

1. Griff
2. Bremshebel
3. Rückenlehne
4. Sitz
5. Einstellknopf für Handgriffhöhe
6. Vorn angebrachte Einkaufstasche
7. Arretierung für Laufrad
8. Drucktaste zum Einklappen des Laufrades
9. Lenkrad (um 360 Grad schwenkbar)



4. Handhabung

- A. Zusammenklappen und Entfalten
- B. Einstellung der Höhe des Sitzes und der Handgriffe
- C. Feststellbremse
- D. Einstellung der Rückenlehne
- E. Einstellung des Bremsseiles
- F. Vorn angebrachte Einkaufstasche

A. Zusammenklappen und Entfalten

Zusammenklappen:


1. Klappen Sie den Rollator zusammen, indem Sie den Gurt vorn in der Mitte des Sitzes nach oben ziehen (Bild A).
2. Drücken Sie die Drucktaste zum Einklappen des Laufrades (Bild B).
3. Klappen Sie das Laufrad ein (Bild C).
4. Arretieren Sie das Laufrad (Bild D).



Entfalten:

1. Drehen Sie die Räder entgegen der Laufrichtung (Bild E).

2. Lösen Sie die Arretierung des Laufrades (Bild F).
3. Klappen Sie das Laufrad aus; ein "Klickgeräusch" zeigt an, dass die Räder in ihrer Stellung eingerastet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Drucktaste für das Einklappen des Laufrades richtig eingerastet ist (Bild G).
4. Ziehen Sie die Handgriffe auseinander und drücken Sie den Sitz in seine Position (Bild H).

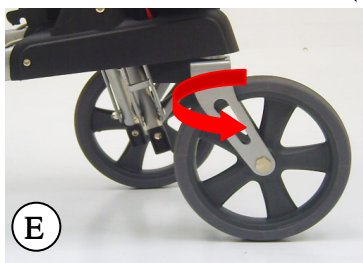

B. Einstellung der Höhe des Sitzes und der Handgriffe:

- Ziehen Sie den Einstellknopf für die Handgriffhöhe heraus und bringen Sie jetzt den Sitz auf die gewünschte Höhe und geben Sie den Knopf danach frei. Vergewissern Sie sich,



dass der Sitz richtig eingerastet ist.

- Lösen Sie den Einstellknopf für die Handgriffhöhe und stellen Sie den Handgriff auf die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie danach den Knopf fest. Vergewissern Sie sich, dass die Knöpfe festgezogen und die Handgriffe in ihrer Position gesichert sind.

C. Bremsen und Abstellen:

- Heben Sie die Bremshebel an, um die Bremse an dem Rollator zu betätigen.
- Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Bremsen an dem Rollator festzustellen.



D. Einstellung der Rückenlehne

Verfahren Sie wie folgt, um die Rückenlehne einzustellen:

- Entfernen Sie den Sicherungsclip und nehmen Sie die Rückenlehne von dem Rollator ab. Um die Rückenlehne wieder anzubauen, setzen Sie die Rückenlehne in das Rohr unter dem Sitz ein und bauen Sie die Sicherungsclips wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsclips richtig sitzen.



E. Einstellung des Bremsseiles

Vor der Benutzung des Rollators sind die Bremsen auf einwandfreie Funktion zu prüfen. Sie können die Wirksamkeit der Bremse einstellen, indem Sie den Knopf unter dem Laufrad lockern/anziehen.


ACHTUNG: WENN DIE BREMSEN ZU STRAFF EINGESTELLT SIND, WERDEN DIE FESTSTELLBREMSEN NICHT RICHTIG ARRETIEREN.



F. Vorn angebrachte Einkaufstasche

- Zum Anbau der Einkaufstasche vor dem Rollator haken Sie die elastischen Bänder ein, um die Tasche in ihrer Position zu halten.

- Ziehen Sie den Klettverschluss um die faltstange, um einen festeren Sitz der Tasche an dem Rollator zu erreichen.

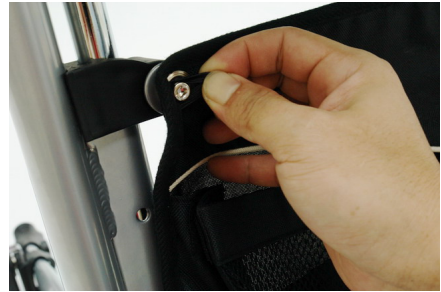

5. Technische Daten

Abmessungen	Länge: 675 * Breite: 620 * Höhe: 850 (26,5" * 24,5" * 33,5")
Abmessungen im zusammengeklappten Zustand	Länge: 445 * Breite 280 * Höhe 850 (17,5" * 11" * 33,5")
Größe des Kartons	15,25" * 10,5" * 35"
Radgröße	Lenkrad:8" Laufrad:8"
Sitzhöhe	540 ~ 610 (21-1/4" ~ 24") / drei Einstellpositionen
Griffhöhe	775 ~ 980 (30.5" ~ 38.5") / sechs Einstellpositionen
Gewicht	9,8 kg
Tragfähigkeit	250 lbs. (ca. 115 kg)
Material	Aluminium und Faserverbundwerkstoff
Nutzlast der	(max.) 3 kg

6. Sicherheitshinweise

FÜR IHRE PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Im Interesse Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens achten Sie bitte auf Ihre Körperhaltung und halten Sie den Rollator so, dass Sie die Bremsen gut bedienen können.
- Bewahren Sie den Rollator bitte in einer sicheren Umgebung auf.
- Entfalten Sie den Rollator vor der Benutzung vollständig in die arretierte Stellung.
- Vermeiden Sie ein Quetschen Ihrer Finger. Bringen Sie Ihre Finger nicht in das Gelenk des Rollators, wenn Sie diesen zusammenklappen oder zur Benutzung entfalten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Räder fest sind und auf dem Boden stehen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Vergewissern Sie sich davon, dass die Bremsen richtig eingestellt sind und vor der Benutzung überprüft worden sind.
- Vergewissern Sie sich davon, dass der Sitz in seiner Position arretiert ist, bevor Sie sich darauf setzen.
- Setzen Sie sich stets in die Mitte des Sitzes und achten Sie darauf, dass der Sitz so eingestellt ist, dass der Benutzer mit den Füßen auf den Boden reicht.

- Arretieren Sie stets die Feststellbremsen, bevor Sie sich auf das Gerät setzen.
- Setzen Sie sich niemals auf den Rollator, wenn dieser zur Aufbewahrung zusammengeklappt ist.
- Stellen Sie sich nicht auf den Rollator und benutzen Sie diesen nicht als Trittstufe.
- Nutzen Sie den Rollator nicht, um eine Person auf dem Rollator zu befördern.
- Gehen Sie entsprechend vorsichtig vor, wenn Sie den Rollator anheben oder tragen.

GEWÄHRLEISTUNG

Es wird empfohlen, den Rollator in regelmäßigen Abständen warten zu lassen, um seine Sicherheit und Lebensdauer zu optimieren.

Sie erhalten auf Ihren neuen Rollator eine umfassende Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Tag der Lieferung.

Die Gewährleistung erstreckt sich auf die Reparatur und den Austausch des Rollators während der genannten Frist.

Beachten Sie bitte auch die folgenden Hinweise zur Gewährleistung:

1. Alle Arbeiten und der Austausch von Teilen müssen von autorisierten Händlern oder einer autorisierten Werkstatt durchgeführt werden.
 2. Gewährleistungsansprüche müssen bei dem Fachhändler geltend gemacht werden, bei dem Sie den Rollator gekauft haben.
 3. Alle Teile des Rollators, die innerhalb der Gewährleistungsfrist wegen eines Material- oder Verarbeitungsfehlers instand gesetzt oder ausgetauscht werden müssen, werden Ihnen kostenlos geliefert.
 4. Für instand gesetzte oder ausgewechselte Teile gilt die restliche Gewährleistungsfrist für den Rollator ebenfalls.
 5. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar.
 6. Unter normalen Umständen werden Gewährleistungsansprüche in den folgenden Fällen nicht anerkannt:
 - a) Wenn der Rollator nicht entsprechend den Empfehlungen des Herstellers gewartet worden ist.
 - b) Wenn andere als die von dem Hersteller vorgeschriebenen Teile verwendet worden sind.
 - c) Wenn der Rollator durch Vernachlässigung, Unfall oder unsachgemäße Nutzung beschädigt worden ist.
 - d) Wenn der Rollator oder Teile des Gerätes gegenüber der Spezifikation des Herstellers geändert worden sind oder wenn Reparaturen an dem Gerät versucht worden sind, bevor der Händler benachrichtigt wurde.
- Der Hersteller behält sich Änderungen des Gewichtes, der Abmessungen beziehungsweise der in dieser Betriebsanleitung genannten technischen Daten vor. Alle hierin genannten Angaben, Maße und Leistungswerte sind Zirkawerte und keine genauen technischen Daten. Alle Rechte vorbehalten.